

# シエンタ ウェルキャブスロープタイプ (2015年7月～モデル)

## 操作のポイント～乗車編～

### 1 乗車準備



助手席を前方に  
スライドし、セカンド  
シートがある場合は  
タンブルする

### 2 車高調整



バックドアを開け、  
車高調整スイッチの  
「下」を押す

### 3 スロープを出す



スロープを支えながら  
ロック解除レバーを  
引き、スロープを  
引き出す

### 4 後退防止解除



後退防止スイッチの  
「解除」を確認する

### 5 セーフティベルトをかける



引き出した  
セーフティベルトの  
フックを車いすに  
かける

### 6 車いすの乗車



後退防止スイッチを  
「作動」にし、車いすの  
ブレーキを解除し  
車内に乗り入れる

### 7 車いす固定フックをかける



床から車いす固定  
装置のフックを取り  
出し、車いすに  
かける

### 8 車いす固定スイッチ



固定装置スイッチの  
「ロック」を押す

### 9 車いすブレーキ



車いすのブレーキ  
をかける

### 10 シートベルト着用



車いす用のシート  
ベルトを着用する

### 11 スロープの格納



スロープを車内に  
入れる

### 12 車高調整



車高調整スイッチの  
「上」を押す

完了

# シエンタ ウェルキャブスロープタイプ (2015年7月~モデル)

## 操作のポイント ~降車編~

### 1 車高調整



バックドアを開け、車高調整スイッチの「下」を押す

### 2 スロープを出す



スロープを支えながらロック解除レバーを引き、スロープを引き出す

### 3 車いす固定スイッチ



車いす固定装置スイッチの「解除」を押す

### 4 車いす固定フックをはずす



車いすからフックをはずす

### 5 車いすブレーキ



車いすのブレーキを解除する

### 6 後退防止解除



後退防止スイッチの「解除」を押す

### 7 車いすの降車



車いすを少し前に押してから、後退し車外に出す

### 8 セーフティベルトをはずす



車いすのブレーキをかけ、セーフティベルトのフックをはずす

### 9 セーフティベルトの収納



セーフティベルトを車内に巻き取る

### 10 スロープの格納



スロープをたたみ、車内に戻す

### 11 車高調整



車高調整スイッチの「上」を押す

完了