



いつでも

トヨタ 後付け純正用品

ウェルキャブ


ターンチルトシート ～操作手順～

1 乗車準備



パーキングブレーキをかけ、「P」スイッチを押します。

4 着座

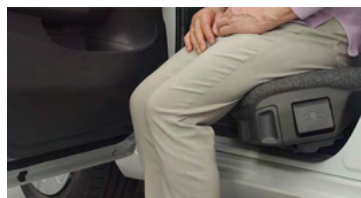

乗車する方を着座させます。

2 シートをスライド



ターンチルトシートを回転開始位置までスライド

5 中間位置まで回転



回転レバーを引き上げて、回転操作グリップを持ち、中間ロック位置まで回転させます。

3 シートを外側に引き出す



回転レバーを引き、回転操作グリップを持ってシートを外側へロックがかかるまで引き出します。

6 回転終了位置まで回転



乗車する方の足の中に入れ、再度回転レバーを引き上げて、回転終了位置までシートを回転させます。

完了