

操作のポイント ～乗車編～

1 LIFTメインスイッチON




運転席のLIFTメインスイッチをONにする
ONにした後、バックドアを全開にすると
ランプが点灯する

2 リフトを下げる



バックドアを全開にし、操作スイッチの「下」を
押し続ける
下がり切ると停止し、「ピピッ」とブザーが鳴る

3 後退防止ストッパーを倒す

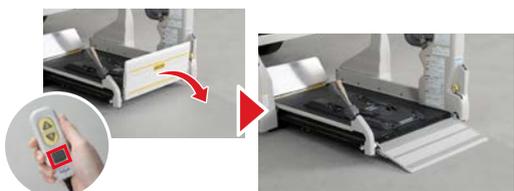

操作スイッチの倒しボタンを押し続け、
後退防止用ストッパーを倒す

4 ワンタッチ固定を解除



リフト右側のワンタッチ固定スイッチの
「解除」を押し、フックを出す

5 乗車し、ワンタッチ固定をロック



車いすをリフトに乗せ、白いフックが
車いすのアンカーバーにかかったら
ワンタッチ固定スイッチの「ロック」を押す

6 車いすのブレーキ・シートベルトをかける



車いすのブレーキをかけ、
車いす用シートベルトをかける

7 リフトの格納



操作スイッチの「上」を押し続ける
上がり切ると停止し、「ピピッ」とブザーが鳴る

8 LIFTメインスイッチOFF



バックドアを閉め、LIFTメインスイッチを
OFFにする

完了

操作のポイント ～降車編～

1 LIFTメインスイッチON




運転席のLIFTメインスイッチをONにする
ONにした後、バックドアを全開にすると
ランプが点灯する

2 リフトを下げる



バックドアを全開にし、操作スイッチの「下」を
押し続ける
下がり切ると停止し、「ピピッ」とブザーが鳴る

3 後退防止ストッパーを倒す

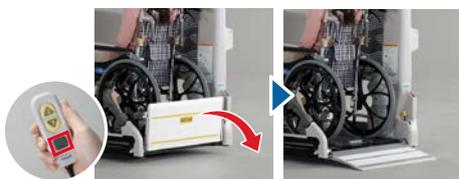

操作スイッチの倒しボタンを押し続け、
後退防止用ストッパーを倒す

4 シートベルトをはずす



車いす用のシートベルトをはずす

5 ワンタッチ固定を解除



ワンタッチ固定スイッチの「解除」を押す

6 車いすの降車



車いすのブレーキを解除し、降車する

7 ワンタッチ固定をロック



ワンタッチ固定スイッチの「ロック」を押し、
フックを格納する

8 リフトの格納



操作スイッチの「上」を押し続ける
上がり切ると停止し、「ピピッ」とブザーが鳴る

9 LIFTメインスイッチOFF



バックドアを閉め、LIFTメインスイッチをOFFに
する

完了