

# シエンタ ウェルキャブスロープタイプ (2015年7月～2022年7月モデル)


## 操作のポイント ～乗車編～

### 1 乗車準備



助手席を前方にスライドし、セカンドシートがある場合はタンブルする

### 2 車高調整

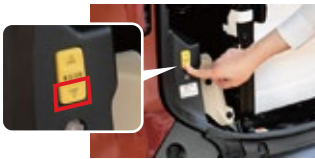

バックドアを開け、車高調整スイッチの「下」を押す

### 3 スロープを出す



スロープを支えながらロック解除レバーを引き、スロープを車外へ最後まで引き出す

### 4 後退防止解除



後退防止スイッチの「解除」を確認する

### 5 セーフティベルトをかける



引き出したセーフティベルトのフックを車いすにかける

### 6 車いすの乗車



後退防止スイッチを「作動」にし、車いすのブレーキを解除し車内に乗り入れる

### 7 車いす固定フックをかける



床から車いす固定装置のフックを取り出し、車いすにかける

### 8 車いす固定スイッチ



固定装置スイッチの「ロック」を押す

### 9 車いすブレーキ



車いすのブレーキをかける

### 10 シートベルト着用



車いす用のシートベルトを着用する

### 11 スロープの格納



スロープを車内に入れる

### 12 車高調整




車高調整スイッチの「上」を押す

完了

# シエンタ ウェルキャブスロープタイプ (2015年7月～2022年7月モデル)

## 操作のポイント ～降車編～

### 1 車高調整

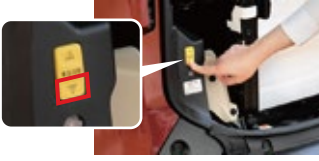

バックドアを開け、  
車高調整スイッチの  
「下」を押す

### 7 車いすの降車



車いすを少し前に  
押してから、後退し  
車外に出す

### 2 スロープを出す



ロック解除レバー

スロープを支えながら  
ロック解除レバーを  
引き、スロープを車外へ  
最後まで引き出す

### 8 セーフティベルトをはずす



車いすの  
ブレーキをかけ、  
セーフティベルトの  
フックをはずす

### 3 車いす固定スイッチ



車いす固定装置  
スイッチの  
「解除」を押す

### 9 セーフティベルトの収納



セーフティベルトを  
車内に巻き取る

### 4 車いす固定フックをはずす



車いすから  
フックをはずす

### 10 スロープの格納



スロープをたたみ、  
車内に戻す

### 5 車いすブレーキ



車いすのブレーキを  
解除する

### 11 車高調整



車高調整スイッチの  
「上」を押す

### 6 後退防止解除



後退防止スイッチの  
「解除」を押す

完了