

## 操作のポイント ～乗車編～

### 1 LIFTメインスイッチON




運転席の LIFT メインスイッチを ON にする  
ON にした後、バックドアを全開にすると  
ランプが点灯する

### 2 リフトを下げる




バックドアを全開にし、操作スイッチの「下」を  
押し続ける  
下がり切ると停止し、「ピピッ」とブザーが鳴る

### 3 後退防止ストッパーを倒す

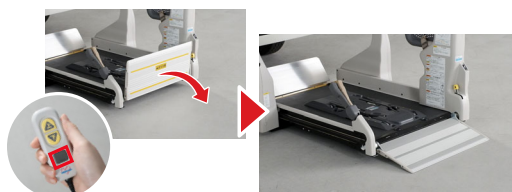

操作スイッチの倒しボタンを押し続け、  
後退防止用ストッパーを倒す

### 4 ワンタッチ式固定を解除

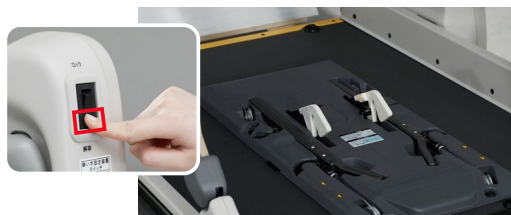


リフト右側のワンタッチ式固定スイッチの  
「解除」を押し、フックを出す

### 5 乗車し、ワンタッチ式固定をロック



車いすをリフトに乗せ、白いフックが  
車いすのアンカーバーにかかったら  
ワンタッチ式固定スイッチの「ロック」を押す

### 6 車いすのブレーキ・シートベルトをかける

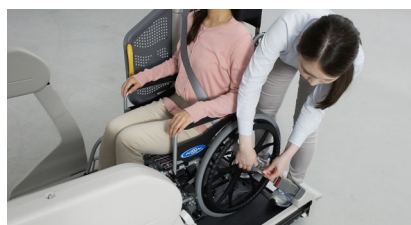

車いすのブレーキをかけ、  
車いす用シートベルトをかける

### 7 リフトの格納



操作スイッチの「上」を押し続ける  
上がり切ると停止し、「ピピッ」とブザーが鳴る

### 8 LIFTメインスイッチOFF



バックドアを閉め、LIFT メインスイッチを  
OFF にする

完了


## 操作のポイント ～降車編～

### 1 LIFTメインスイッチON




運転席の LIFT メインスイッチを ON にする  
ON にした後、バックドアを全開にすると  
ランプが点灯する

### 2 リフトを下げる

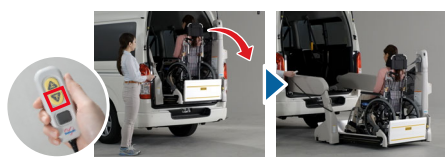

バックドアを全開にし、操作スイッチの「下」を  
押し続ける  
下がり切ると停止し、「ピピッ」とブザーが鳴る

### 3 後退防止ストッパーを倒す

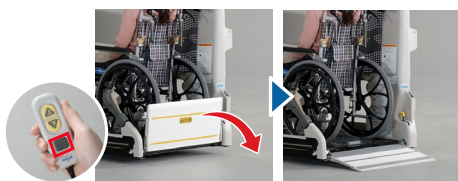

操作スイッチの倒しボタンを押し続け、  
後退防止用ストッパーを倒す

### 4 シートベルトをはずす



車いす用のシートベルトをはずす

### 5 ワンタッチ式固定を解除



ワンタッチ式固定スイッチの「解除」を押す

### 6 車いすの降車



車いすのブレーキを解除し、降車する

### 7 ワンタッチ式固定をロック



ワンタッチ式固定スイッチの「ロック」を押し、  
フックを格納する

### 8 リフトの格納



操作スイッチの「上」を押し続ける  
上がり切ると停止し、「ピピッ」とブザーが鳴る

### 9 LIFTメインスイッチOFF



バックドアを閉め、LIFT メインスイッチを OFF に  
する

完了