

ハイエース ウェルキャブリフトタイプ (2004年8月～モデル)

操作のポイント ～乗車編～

1 LIFTメインスイッチON




運転席のLIFTメインスイッチをONにする
ONにした後、バックドアを全開にすると
ランプが点灯する

2 リフトを下げる



バックドアを全開にし、操作スイッチの「下」を
押し続ける
下がり切ると停止し、「ピピッ」とブザーが鳴る

3 後退防止ストッパーを倒す

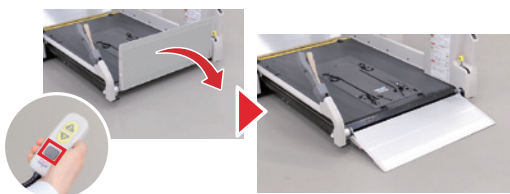


操作スイッチの倒しボタンを押し続け、
後退防止用ストッパーを倒す

4 車いすブレーキをかける



車いすをリフト上の停止位置で止めて、
車いすのブレーキをかける

5 車いすの固定

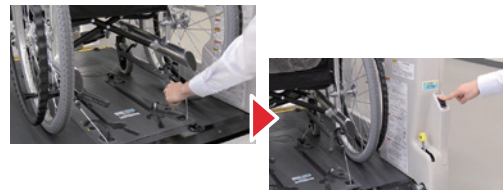

サポートバーを持ち、車いすに固定装置の
フックをかけ、固定装置スイッチの
「ロック」を押す

6 シートベルトをかける



車いす用のシートベルトを着用する

7 リフトの格納



操作スイッチの「上」を押し続ける
上がり切ると停止し、「ピピッ」とブザーが鳴る

8 LIFTメインスイッチOFF



バックドアを閉め、LIFTメインスイッチを
OFFにする

完了

ハイエース ウェルキャブリフトタイプ (2004年8月～モデル)


操作のポイント ～降車編～

1 LIFTメインスイッチON



運転席のLIFTメインスイッチをONにする
ONにした後、バックドアを全開にすると
ランプが点灯する

5 車いすの固定解除

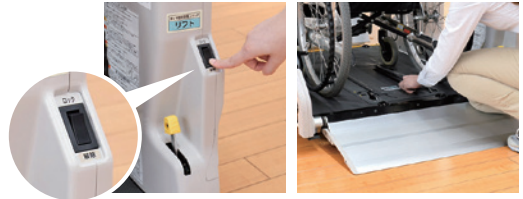

車いす固定装置の固定を解除し、
フックをはずす

2 リフトを下げる




バックドアを全開にし、操作スイッチの「下」を
押し続ける
下がり切ると停止し、「ピピッ」とブザーが鳴る

6 車いすの降車




車いすのブレーキを解除し、降車する

3 後退防止ストッパーを倒す

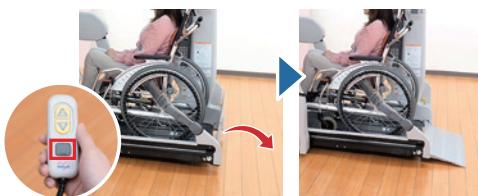

操作スイッチの倒しボタンを押し続け、
後退防止用ストッパーを倒す

7 リフトの格納

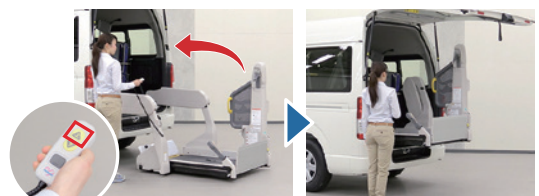

操作スイッチの「上」を押し続ける
上がり切ると停止し、「ピピッ」とブザーが鳴る

4 シートベルトをはずす



車いす用のシートベルトをはずす

8 LIFTメインスイッチOFF



バックドアを閉め、LIFTメインスイッチを
OFFにする

完了