

ノア・ヴォクシー ウェルキャブスロープタイプ (2014年1月～2021年12月モデル)

操作のポイント ～乗車編～

1 乗車準備



エンジンをかけた状態で、運転席のメインスイッチをONにする

2 車高調整



バックドアを開け、車高調整スイッチの「下」を押す

3 スロープを出す



スロープを支えながらロック解除レバーを引き、スロープを車外へ最後まで引き出す

4 セーフティベルトスイッチ



セーフティベルトスイッチを“ピーツ”とブザーが鳴るまで長めに引く

5 セーフティベルトをかける



引き出したセーフティベルトのフックを車いすにかける

6 車いすの乗車



セーフティベルトスイッチを押すとランプが点灯し、後退防止が作動
車いすのブレーキを解除し車内に乗り入れる

7 車いす固定フックをかける



床から車いす固定装置のフックを取り出し、車いすにかける

8 車いす固定スイッチ



固定装置スイッチの「ロック」を押す

9 車いすブレーキ



車いすのブレーキをかける

10 シートベルト着用



車いす用のシートベルトを着用する

11 スロープの格納



スロープを車内に入れる

12 車高調整



車高調整スイッチの「上」を押す

完了

ノア・ヴォクシー ウェルキャブスロープタイプ (2014年1月～2021年12月モデル)

操作のポイント ～降車編～

1 車高調整



バックドアを開け、
車高調整スイッチの
「下」を押す

2 スロープを出す



ロック解除レバー

スロープを支えながら
ロック解除レバーを
引き、スロープを車外へ
最後まで引き出す

3 車いす固定スイッチ



車いす固定装置
スイッチの
「解除」を押す

4 車いす固定フックをはずす



車いすからフックを
はずす

5 車いすブレーキ



車いすのブレーキを
解除する

6 セーフティベルトスイッチ解除



セーフティベルト
スイッチを“ピーツ”と
ブザーが鳴るまで
長めに引く

7 車いすの降車



車いすを少し前に
押してから、後退し
車外に出す

8 セーフティベルトをはずす



車いすのブレーキを
かけ、セーフティ
ベルトのフックを
はずす

9 セーフティベルトの収納



セーフティベルトを
車内に巻き取る

10 スロープの格納



スロープをたたみ、
車内に戻す

11 車高調整



車高調整スイッチの
「上」を押す

完了