

ノア・ヴォクシー 車いす仕様車 ワンタッチ式固定装置

セーフティベルトでのワンタッチ固定の操作ポイント ～乗車編～

1 車高調整



エンジンをかけた状態で、バックドアを開けると自動で車高が下がる

2 スロープの展開



スロープを支えながらロック解除レバーを引き、スロープを車外へ最後まで引き出す

3 固定アームを上昇させる



上昇・下降スイッチの「上昇」を押し、固定アームを上げる

4 インジケータの点滅を確認



固定・解除インジケータが点滅していることを確認
※消灯しているときは「解除」を押す

5 セーフティベルトをかける




引き出したセーフティベルトのフックを車いすにかけ、車内へ乗り入れる

6 車いすをセンターラインに合わせる



車いすを固定装置手前のセンターラインに合わせて進む

7 固定アームに固定

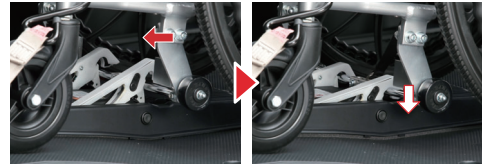

車いすを固定アームに押しあて、固定する

8 車いすブレーキをかける



車いすのブレーキをかける

9 車いすの固定を確認



車いすを前後にゆすり、アンカーバーが固定アームに確実に固定されていることを確認する

10 シートベルト着用



車いす用のシートベルトを着用する

11 スロープの格納



スロープをたたみ、車内に戻す
バックドアを閉めると自動で車高が上がる

完了

ノア・ヴォクシー 車いす仕様車 ワンタッチ式固定装置

シートベルトでのワンタッチ固定の操作ポイント ～降車編～

1 車高調整



エンジンをかけた状態で、バックドアを開けると自動で車高が下がる

2 スロープの展開



スロープを支えながらロック解除レバーを引き、スロープを車外へ最後まで引き出す

3 シートベルトをはずす



車いす用のシートベルトをはずす

4 インジケータの点滅を確認



固定・解除インジケータが点滅していることを確認

5 固定アームを上昇させる



上昇・下降スイッチの「上昇」を押し、固定アームを上げる

6 車いすブレーキの解除



車いすのブレーキを解除する

7 固定アームからはずす



車いすを少し前に押してから、車いすを車外に降ろす

8 セーフティベルトをはずす



車いすのブレーキをかけ、セーフティベルトのフックをはずし、車内へ巻き取る

9 固定アームを格納



上昇・下降スイッチの「下降」を長押し、固定アームを下降させる

10 スロープの格納



スロープをたたみ、車内に戻す
バックドアを閉めると自動で車高が上がる

完了